

LOCK ARM F-X

製品外観



ロックアームF-X (HM1030使用)

主な製品構成



ロックアーム本体



取付治具



フットスイッチ

アタッチメント(選択式)



アタッチメント (HM1030)



アタッチメント (HM1430)



アタッチメント (HM3242N)


製品名	品番
ロックアームF-X	F-X
ロックアームF-X アタッチメントボールジョイントタイプ	F-X-BJ
ロックアームF-X 増圧弁付きシュレーダー	F-X-PB
ロックアームF-X 増圧弁シュレーダー/ボールジョイント	F-X-PBBJ

医療機器届出番号: 13B1X00172SJ0001
販売名: ロックアームF-X

オプション一例



アタッチメント (HMST-135SBJ)

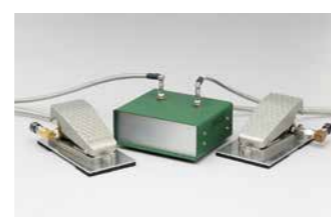

ダブルフットスイッチ

ロックアーム構成		
品名	品番	
本体アーム	LA0010-01	
フットスイッチ	LA0010-02	
取付治具	LA0010-03	
バイピングチューブ	右記以外	F-X-PB / F-X-PBBJ
	1) ML-PT-01 (DISS) 2) ML-PT-02 (M20) 3) ML-PT-03 (シュレーダー) 4) ML-DPT-01 (コンプレッサー用)	07-200-0400 (シュレーダー増幅弁)
アタッチメント	F-X / F-X-PB (下記より1つ選択)	F-X-BJ / F-X-PBBJ (下記より1つ選択)
	1) HM1030 (硬性鏡外筒保持用5~10mm) 2) HM1430 (硬性鏡本体保持用14~30mm) 3) HM3242N (カメラヘッド保持用32~42mm)	1) HM1030BJ (硬性鏡外筒保持用5~10mm) 2) HM1430BJ (硬性鏡本体保持用14~30mm) 3) HM3242NBJ (カメラヘッド保持用32~42mm)

オプション			
製品名	品番	製品名	品番
アタッチメント 鉗子アウター保持用(3mm・5mm・10mm)	HMST-135SBJ	専用架台 (F-X用)	KD1
アタッチメント 膈へら保持用(~50mm)	IS1000	内視鏡アクセスポートホルダー	APH-01
ダブルフットスイッチ	07-200-0200	ロックアームカバー (20枚入)	PP-FX-01

■製造販売元

 **株式会社メディカルリーダーズ**
第一種医療機器製造販売業許可番号: 13B1X00172

本社
〒113-0034 東京都文京区湯島4-2-1
TEL: 03-5803-9271 FAX: 03-5803-9275
<http://www.leaders.co.jp>

Flexibility & Immobility & Assistance

LOCK ARM F-X

 **株式会社メディカルリーダーズ**

LOCK ARM F-X

フレキシブル

- 任意の形状に固定できるフレキシブルなアーム
- 本体の角度や高さを最適なポジションに調整可能
- ボールジョイントの採用による自由なポジショニング



コンパクトデザイン


- 手術台に取付けが可能なコンパクトデザイン




設置例: MOT-VS600Dj(ミスホ社製)

汎用性


- アタッチメントにより様々な器具の保持が可能

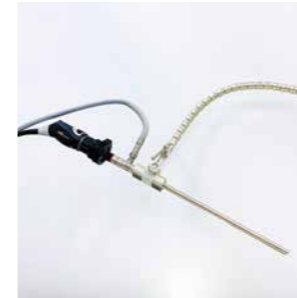

スコープ本体(HM1030)

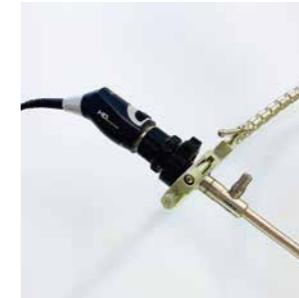

スコープアイピース(HM1430)

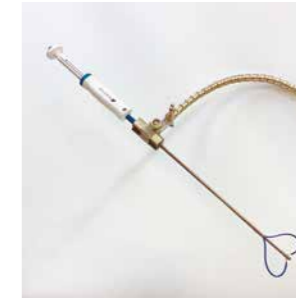

圧排器具(HM1030)



子宮マニピュレータ(HM3242N)


簡単操作

- フットスイッチによる簡単操作でアームの固定/解除が可能
- 電源不要

5 STEP SETTING




本体を
ベッドサイドレールに
設置

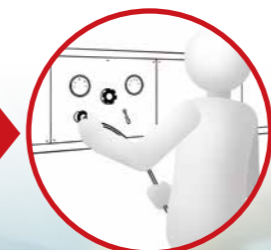


動力用
ガス管を接続



専用の滅菌カバーを
取り付け

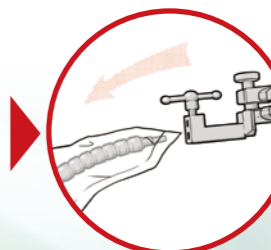

アタッチメントを
取り付け

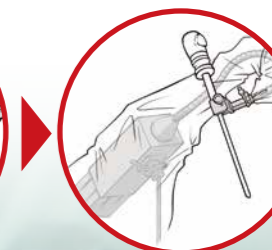

アタッチメントで
器具を保持

