

クリーニングブラシ ラインアップ

ロングテールブラシ ラインアップ
適合鉗子口径：1.9-2.5mm

* 受注発注品

色	ブラシ形状	製品番号	製品名	ブラシ外径	有効長	入り数 / 箱
オレンジ		10040*	ロングテールブラシ L120cm φ 1.9-2.5mm	3mm	120cm	100
緑		10030	ロングテールブラシ L160cm φ 1.9-2.5mm		160cm	100

適合鉗子口径：2.1-4.5mm

色	ブラシ形状	製品番号	製品名	ブラシ外径	有効長	入り数 / 箱
青		10050*	ロングテールブラシ L160cm φ 2.1-4.5mm	5mm	160cm	100
黄		10055	ロングテールブラシ L230cm φ 2.1-4.5mm		230cm	100
黄/オレンジ		10075	ロングテール + ツーサイドッド キット (ロングテール L230cm φ 2.1-4.5mm/ ツーサイドッド 5mm/10mm)	5mm 5mm/10mm	230cm	100

その他ブラシ ラインアップ
適合鉗子口径：2.1-4.5mm

色	ブラシ形状	製品番号	製品名	ブラシ外径	有効長	入り数 / 箱
青		10058	マルチポイントブラシ L230cm φ 2.1-4.5mm	5mm	230cm	100
緑		10020	ダブルブラシ L230cm φ 2.1-4.5mm			100
赤		10010	シングルブラシ L230cm φ 2.1-4.5mm			100

バルブ用ブラシ

色	ブラシ形状	製品番号	製品名	ブラシ外径	入り数 / 箱
オレンジ		10060	ツーサイドッドブラシ 5mm/10mm 150 本入	5mm/10mm	150



製品情報、サンプル・お見積りのご依頼はこちらからお問い合わせください

製造販売元




販売元



本社 〒113-0034 東京都文京区湯島4-2-1 杏林ビル TEL:03-5803-9271 / FAX:03-5803-9275
<http://www.leaders.co.jp>

MKTG-28-058

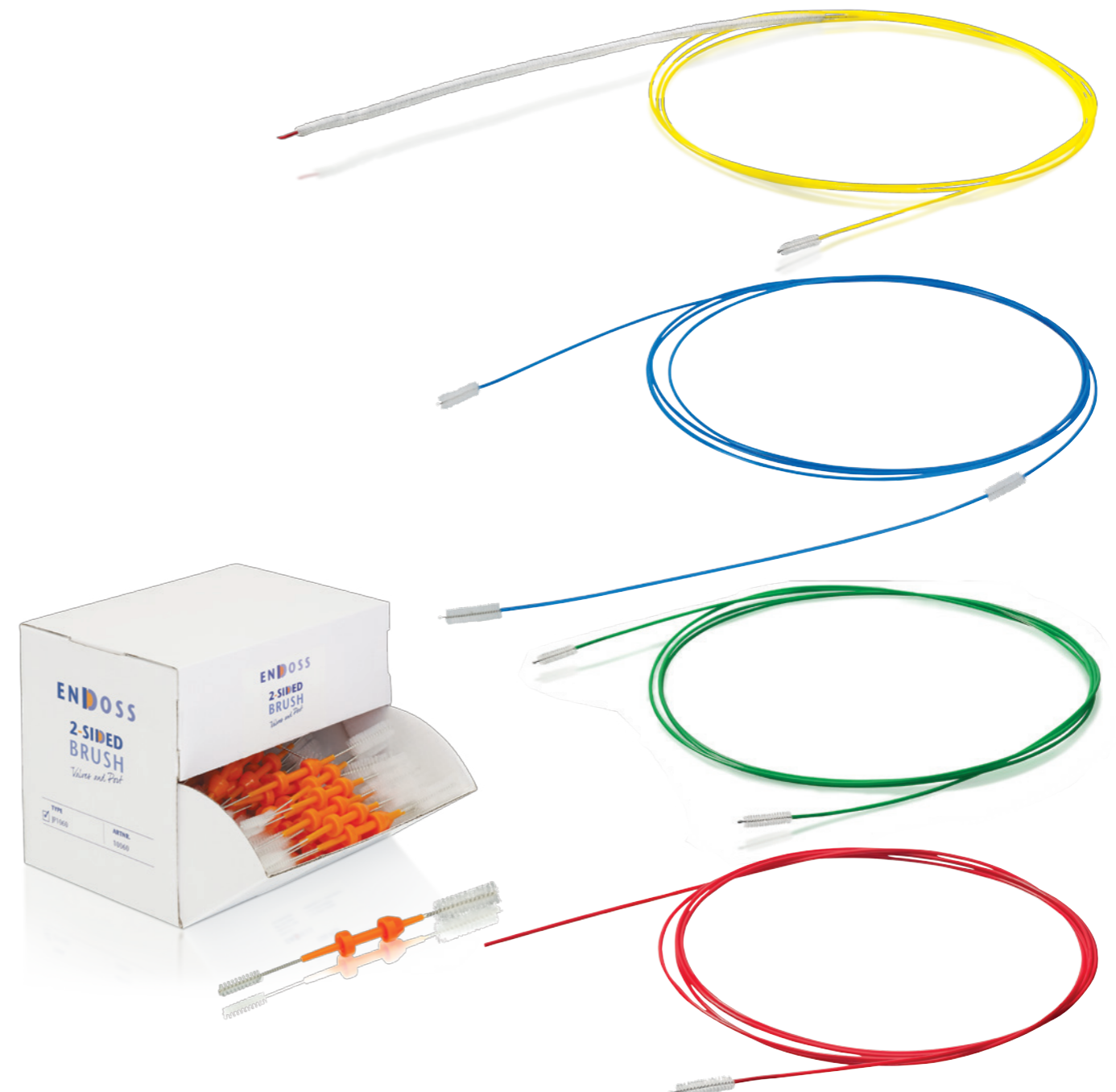


ENDOSS クリーニングブラシ

内視鏡洗浄用ブラシ

独自のロングテールブラシにより、一度のプルスルーで優れた洗浄効果

10055 ロングテールブラシ L230cm φ2.1-4.5mm

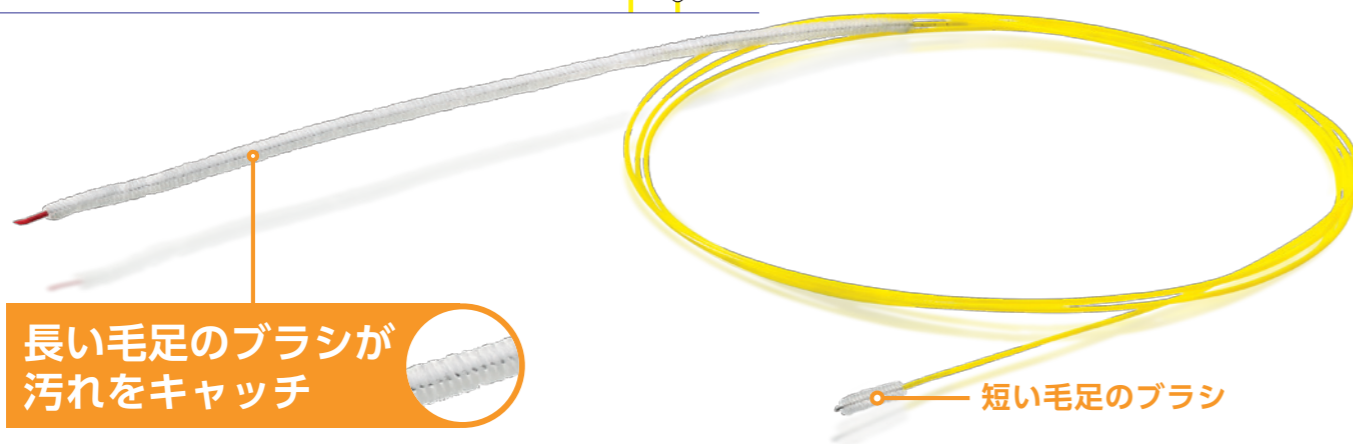

洗浄効果


2種類のブラシで内腔の汚れをしっかりと取り除く!

ブラシの内腔通過イメージ



同社シングルブラシとロングテールブラシを汚染された内視鏡を模したチューブ内腔にそれぞれ一回、一方向に引き抜いた結果。ロングテールブラシではシングルブラシに比べ一度の通過で顕著な内腔汚れの除去が見られた。

シングルブラシを使用

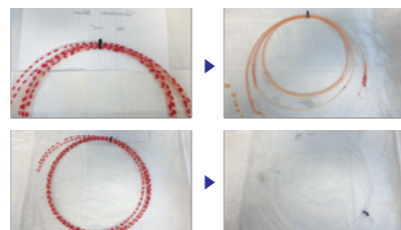


ロングテールブラシを使用

ENDOSS社ベンチテストに基づくデータ

使い方

短い方のブラシから挿入し、一方向に引き抜く。引き抜いたブラシに汚れが付かなくなったら終了。

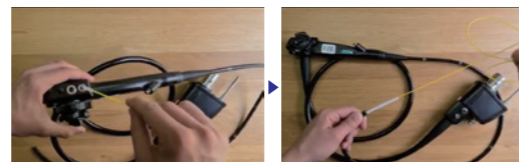


動画はこちらから




https://leaders.co.jp/product_maker/endoss/brush.html

豊富なサイズラインアップ

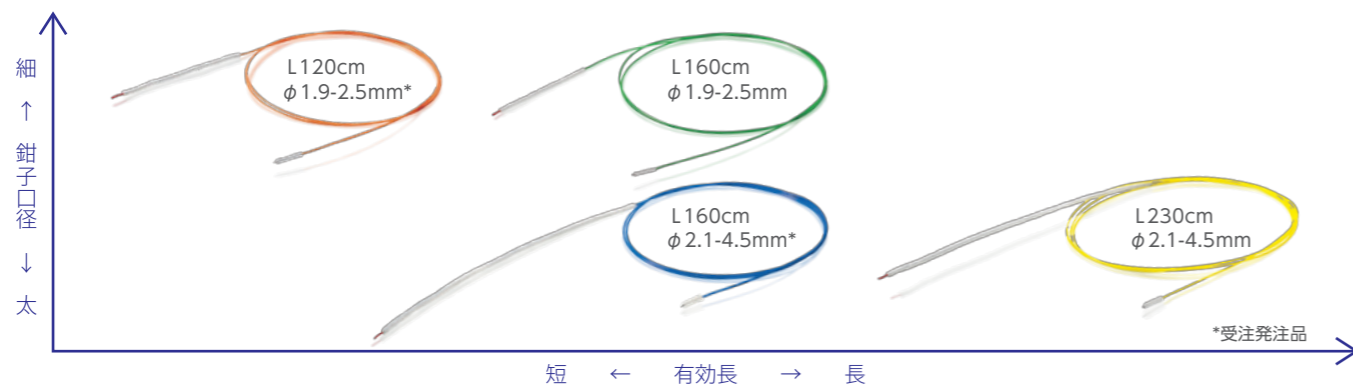


ニーズに合わせて選べる様々なブラシ


10058 マルチポイントブラシ L230cm φ2.1-4.5mm

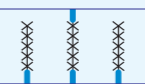

- ・ブラシが3つ付いたマルチユースなブラシ
- ・「一方向に引き抜き(プルスルー式)」
- 「引き戻し(プルバック式)」
- どちらの方式でも使用可能。

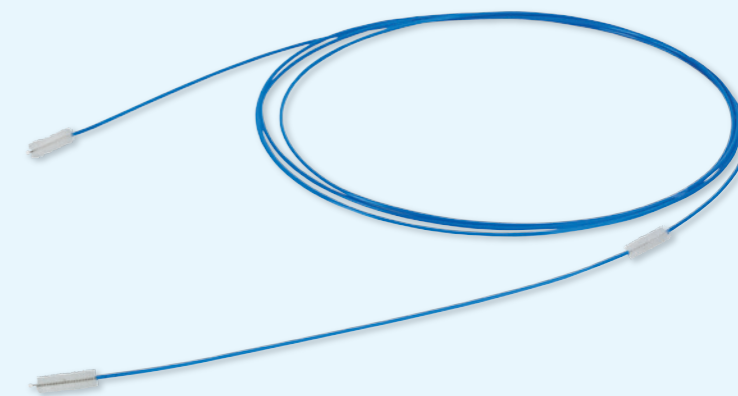

10020 ダブルブラシ L230cm φ2.1-4.5mm

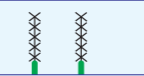

10010 シングルブラシ L230cm φ2.1-4.5mm



シンプルなデザインとコストパフォーマンスを兼ね備えたブラシ。



10060 ツーサイデッドブラシ 5mm/10mm 150本入



10075 ロングテール+ツーサイデッドキット



バルブの洗浄に便利な大小2つのブラシ。くびれのあるハンドルが快適な洗浄作業をサポート。

ロングテールブラシとツーサイデッドブラシの便利な個装キット。

