

結石治療に効率性をアシスト

# CystoAssist



Endourologic Stabilization System



**Leading for Value.**  
追求し続ける、すべての人のために。

## 結石治療に効率性をアシスト

簡便なセットアップでアクセスシースを確実に固定  
安全・効率的な手技をアシストします

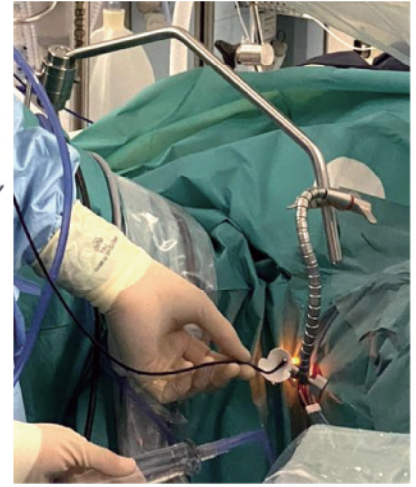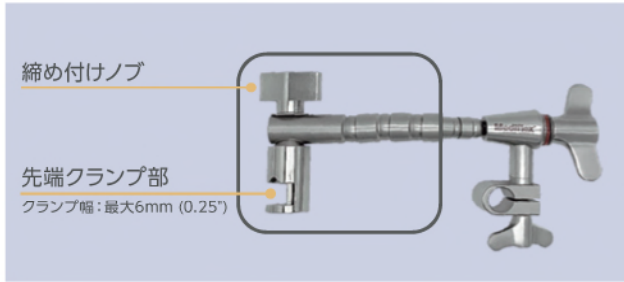

"This is my new favorite device"  
- Dr. Ralph Clayman


## セットアップ方法




1 ベッドサイドにテーブルレール  
クランプを取付ける



2 アーム取付け用ポストを平らな  
面が外側になるようにクランプ  
に挿入し、バーを回して固定する

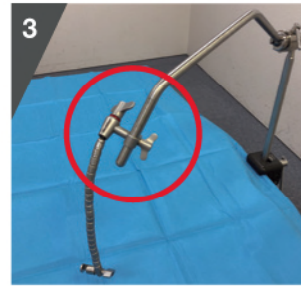

3 尿管アクセスシース固定アーム  
をポストに取付け、締め付けノブ  
を回して固定する

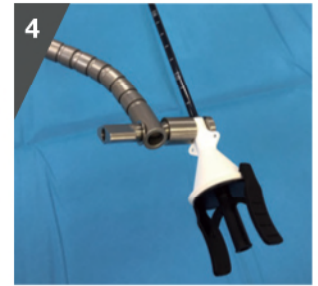

4 先端クランプ部に尿管アクセス  
シースを装着し、締め付けノブ  
を回して固定する

## Order Information

カタログ番号	製品名	販売単位
87009	CystoAssist尿管アクセスシース固定システム (尿管アクセスシース固定アーム、アーム取付け用ポスト (シングルバー)、テーブルレールクランプ)	1セット
87010	CystoAssist軟性尿管鏡固定システム (軟性尿管鏡固定アーム、アーム取付け用ポスト (シングルバー)、テーブルレールクランプ)	1セット
87000	CystoAssist膀胱鏡用シース固定システム (膀胱鏡用シース固定アーム、アーム取付け用ポスト (シングルバー)、テーブルレールクランプ)	1セット

追加パーツ		
カタログ番号	製品名	販売単位
87008	尿管アクセスシース固定アーム	1本
87007	軟性尿管鏡固定アーム	1本
87001	膀胱鏡用シース固定アーム (先端固定具付き)	1本
87004	アーム取付け用ポスト (シングルバー)	1本
87004-D	アーム取付け用ポスト (デュアルバー)	1本
87005	テーブルレールクランプ	1個

アクセサリ		
カタログ番号	製品名	販売単位
87006	CystoAssist専用滅菌トレイ	1個
87006-AT	CystoAssistアクセサリ用滅菌トレイ	1個
87100	CystoAssist専用ケース	1個
99706-SL	軟性尿管鏡固定アーム用 シリコンライナー (4個セット)	1セット

販売名: Mediflexシストアシスト 届出番号: 13B1X00172MF0001

## 関連製品



正確なアクセスで精度の高い手技を実現

**Accura**

尿管アクセスシース  
Ureteral Access Sheath

製造元

**Mediflex**®

製造販売元

**MEDICAL** 株式会社メディカルリーダーズ

本社 〒113-0034 東京都文京区湯島4-2-1 杏林ビル TEL: 03-5803-9271 / FAX: 03-5803-9275

第一種医療機器製造販売業許可番号: 13B1X00172